



IV-NOW: CALENTADORES INDIVIDUALES DE BOLSA DE SUERO

Los calentadores de fluido térmico **ivNow** son calentadores modulares que ponen el fluido calentado a su alcance cuando lo necesite. Calentadores de fluidos **ivNow** son unidades pequeñas, convenientes que se pueden colocar en varias configuraciones y entornos. Encimera, pared y las unidades móviles están disponibles en función de sus necesidades particulares.

ivNow calienta rápidamente y mantiene la temperatura adecuada del líquido (suero o medio de contraste). La superficie de calentamiento, especialmente contorneada, permite recibir una bolsa de suero de capacidad de 1-3 litros. Cada cavidad es controlada por un control individual y visualizador LED. Un sensor en la placa de calentamiento detecta la presencia de una bolsa y se acopla con el mecanismo de calentamiento para calentar rápidamente el fluido. Dos sensores de temperatura monitorean de forma continua la temperatura de la bolsa de fluido para acoplar el calentador según sea necesario para mantener la temperatura del fluido dentro de $0 / -2^{\circ}\text{C}$ ($0 / -3^{\circ}\text{F}$) de la temperatura del punto de ajuste.

El calentador **ivNow** asegura que los fluidos se mantienen a la temperatura adecuada y serán siempre inmediatamente disponible en o cerca de la temperatura del cuerpo en lugar de la temperatura ambiente sin el gasto adicional en consumibles y el tiempo de preparación requerido con sistemas de calentamiento en-línea.



ivNow-1

ivNow-1 con cavidad individual para 1 bolsa de 1-3 litros. Se puede colocar el módulo directamente sobre una encimera, fijar en un atril, poner en un poste de soporte de



ivNow-2

ivNow-2 con 2 cavidades para 2 bolsas de 1-3 litros. Se puede colocar el módulo directamente sobre una encimera, fijar en un atril o fijar en la pared con soportes



ivNow-3

ivNow-3 con 3 cavidades para 3 bolsas de 1-3 litros. Se puede colocar el módulo directamente sobre una encimera, fijar en un atril o fijar en la pared con soportes

Características adicionales

- Configuración modular

Soporte de pared:

Uno a tres (1-3) bolsas de 1-3 litros

Encimera:

Uno a tres (1-3) bolsas de 1-3 litros.

Control electrónico

Controla el tiempo durante el cual la bolsa se ha mantenido en una temperatura específica, que se puede ver después de empujar un botón. Control de vida útil cuando una bolsa de fluido ha sido calentado durante más de 14 días.



Montaje sobre un stand móvil:

- Uno a tres (1-3) bolsas de 1-3 litros.
- Placa de calefacción en aluminio anodizado.
- Hecho en plástico de grado médico.
- Sensores inteligentes de presencia de una bolsa.
- Sensores de temperatura dual.
- Se calienta a 40°C (104°F) en 30 minutos o menos (un poco más largo para calentar bolsas de 3 litros).
- Precisión de $0 / -2^{\circ}\text{C}$ ($0 / -3^{\circ}\text{F}$).