

ENZYMEX

LD Beracah MEDICA

DETERGENTE LÍQUIDO ENZIMÁTICO PARA
LAVADORAS AUTOMATIZADAS Y POR INMERSIÓN

INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA



LAVADORAS



INMERSIÓN



■ VENTAJAS Y CUALIDADES

- El poder de limpieza del ENZYMEX LD permite varios tipos de aplicación :
 - limpieza manual
 - limpieza en ultrasonidos
 - limpieza en lavadoras automatizadas
- Contiene 5 enzimas
- Compatible con una amplia gama de materiales
- Se puede usar en agua dura gracias a sus agentes secuestrantes

Fb Franklab®
notre expertise l'Ultra-Propreté



CE



ENZYMEX LD

DETERGENTE LÍQUIDO ENZIMÁTICO PARA LAVADORAS AUTOMATIZADAS Y POR INMERSIÓN

■ INSTRUCTIVO DE USO

- **Uso en lavadoras automatizadas :**
 - Concentración recomendada: 0.3%(3mL/L) a 0.5%(5mL/L)
 - Temperatura recomendada: 45°C
 - Tiempo de contacto recomendado:..... 4 minutos

La concentración es un parámetro que se adapta según el tipo de instalación, la calidad del agua para lavar y el grado de suciedad.
- **Uso en lavadoras ultrasónicas :**
 - Concentración recomendada: 0.3%(3mL/L) a 1%(10mL/L)
 - Temperatura recomendada: 20 a 60°C
 - Tiempo de contacto recomendado:..... 3 a 15 minutos
- **Utilisation par trempage (lavage manuel) :**
 - Concentración recomendada: 0,3%(3mL/L) a 1%(10mL/L)
 - Temperatura recomendada: 20 a 40°C
 - Tiempo de contacto recomendado:..... 3 a 15 minutos

■ PRECAUCIONES DE USO

Referirse a la Ficha de Datos de Seguridad (FS 010271)

■ CARACTERÍSTICAS

- Aspecto : Líquido
- Couleur : Amarillento
- pH puro : Neutro
- Caducidad : 2 años

■ COMPONENTES

- 5 enzimas
- Agentes secuestrantes
- Agentes tensioactivos

■ PRESENTACIONES

- Caja con 12 bidones de 1Lref. **1027116**
- ① Caja con 4 bidones de 5Lref. **1027120**
- ② Caja con 2 bidones de 10Lref. **1027122**



Producto peligroso- respetar las precauciones de uso. Antes de usarse, leer la etiqueta y la información respecto al producto. Dispositivo médico clase 1



Distribuidor
Beracah
MEDICA

ventas@beracahmedica.mx
662 15 10 979



FT
1760
F1v3_04.2018