

Veta 3X

Máquina de anestesia veterinaria





Edición Naranja 2025

AniFM 1



Bombas de infusión

BC-20 Vet



Analizador hematológico

Vetal 3




Monitor de signos vitales

Veta 3X



Máquina de anestesia

Vetus Nova

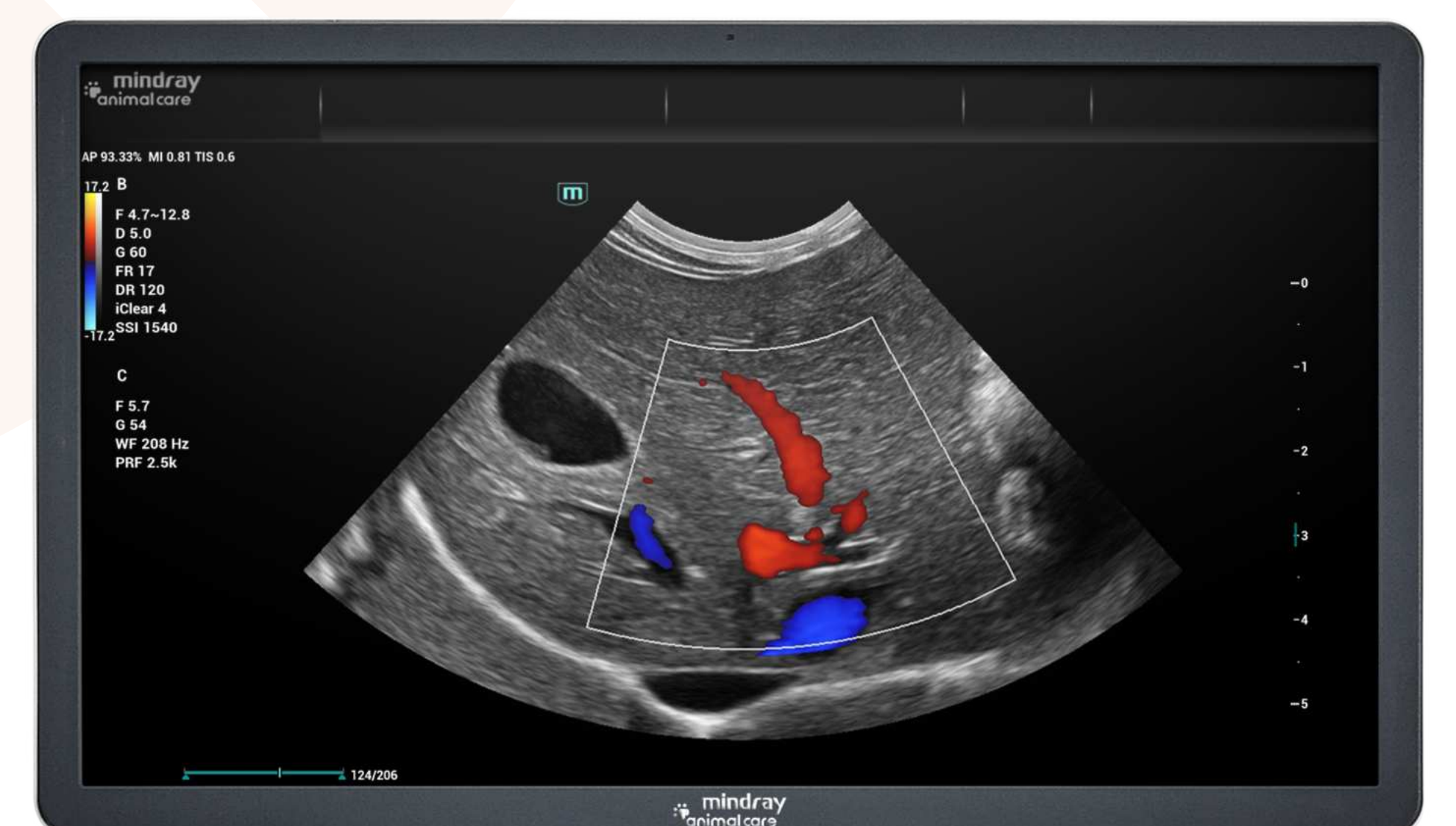

Ultrasonido de gabinete



Veta 3X Torre de anestesia


Monitor de signos vitales **Vetal 3***



Bomba de infusión
AniFM I1*



Porta sueros / porta bombas **SBVETA***

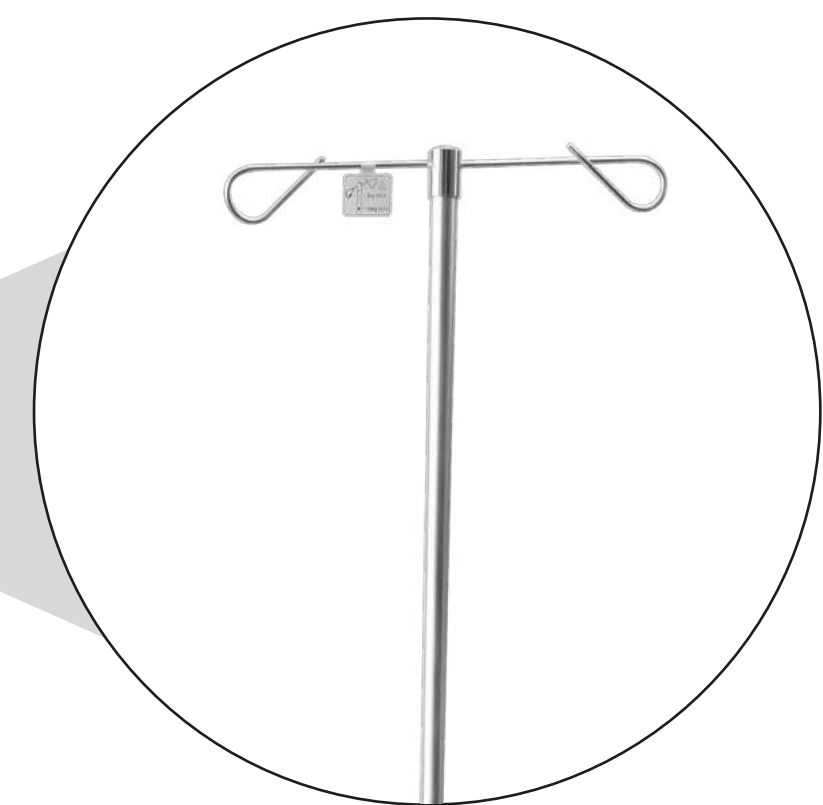

Carrito (trolley)* para máquina de anestesia
(CARRITOBV)



Filtro para gases residuales
VetaGuard*



***Se vende por separado**



Veta 3X

Experimenta lo último en anestesia veterinaria con el nuevo Veta 3X. Diseñado para satisfacer las necesidades en constante cambio de la práctica veterinaria moderna, esta avanzada máquina ofrece precisión, seguridad y confianza incomparables.

Calidad superior

Estructura de alta resistencia

Proporciona protección integral a los componentes principales para una mayor durabilidad; la capacidad de carga mejorada permite levantar la placa superior, lo que facilita en gran manera la movilidad en diversas configuraciones.



Clásico vaporizador V60

Vaporizador V60 de Mindray, con funcionamiento en compensación de flujo/presión/temperatura para una salida precisa y una excelente hermeticidad.

Operación apropiada, con un solo paso



Carga en un solo paso



Módulo de válvula APL

Diseño práctico

Disposición del sistema de respiración

Seleccionado meticulosamente entre más de una docena de esquemas, creado de forma compacta para una fácil observación durante el funcionamiento.



Solución innovadora para la gestión de cables

Considerando el monitoreo y anestesia en conjunto, la solución presenta cableado de manera ordenada y oculta, así como la ubicación de cables segmentados para una cómoda experiencia de usuario.



VetaBain* diseñada para no reinhalación

Hereda la válvula limitadora de presión ajustable (APL) de alta calidad y el manómetro de la serie Veta, lo que garantiza seguridad de anestesia en animales de pequeñas especies.

*Se vende por separado

*El sistema VetaBain y el soporte del monitor son componentes opcionales.



off ◀ **ACGO** ▶ on

Switch en un solo paso



Manejo en un solo paso



Máquina de anestesia veterinaria

Especificaciones físicas

Dimensiones y peso

Unidad principal (colocada sobre la mesa)	
Peso estándar	≤ 20 kg (excluyendo canasta con filtro de gas anestésico; incluyendo accesorios)
Peso máximo	≤ 25 kg (incluyendo canasta con filtro de gas anestésico, monitor (5 kg de peso), AGSS y accesorios)
Alto	400mm
Ancho	400mm
Profundidad	300mm
Unidad principal	(instalada en el trolley básico)
Peso estándar	≤ 23 kg (excluyendo canasta con filtro de gas anestésico; incluye accesorios)
Peso máximo	≤ 32kg (incluye canasta con filtro de gas anestésico, monitor (5 kg de peso), AGSS y accesorios)
Alto	1300mm
Ancho	460mm
Profundidad	510mm
Unidad principal	(instalada en el trolley de alta configuración)
Peso estándar	≤ 30 kg (excluyendo canasta con filtro de gas anestésico; incluye accesorios)
Peso máximo	≤ 40 kg (incluyendo canasta con filtro de gas anestésico, monitor(5 kg de peso), AGSS y accesorios)
Alto	1300mm
Ancho	550mm
Profundidad	700mm
Estante superior	
Largo	310
Ancho	210
Límite de peso	5kg
Especificaciones de sistema neumático	
Suministro de conductos	
Tipo de gas	Oxígeno
Presión de suministro de gas	280 kPa~600 kPa(40PSI~87PSI)
Tipo de conector	NIST o DISS
Número de conector	Uno
Sumnistro de oxígeno	



Rango de flujo	15L/min~25L/min (presión de gas sumnistrado 280kPa(
Medidor de corriente	
Número	Uno
Rango	0L/min ~ 4 L/min
Salida común de gas auxiliar (ACGO)	
Tipo	Switch mecánico
Especificaciones de sistema de respiración automática	
Conector	
Bolsa de puerto manual	22 mm OD / 15 mm ID cónico
Inhalación	22 mm OD / 15 mm ID cónico
Exhalación	22 mm OD / 15 mm ID cónico
Puerto de escaneo	30 mm OD cónico
CO₂ Absorbente	
Volumen	800 mL ± 100 mL
Válvula APL	
Rango	0cmH2O ~ 70cmH2O
Presión de bloqueo	Valor original de válvula APL + 30cmH2O
Manómetro de presión para vías respiratorias	
Tipo	Mecánico
Rango	-20cmH2O~100cmH2O
Especificaciones de vaporizador anestésico	
Vaporizador	
Forma de suministrar	Isoflurano: vaciar contenido, relleno con llave Sevoflurano: vaciar contenido, relleno rápido
Peso	6.0kg (vacío) 6.5kg (lleno)
Volumen de llenado	360 ml (secado rápido) 300 ml (humedecimiento rápido) 260 ml (entre marcas máximas y mínimas)
Rango de concentración	Isoflurano: 0 vol.%~6 vol.% Sevoflurano: 0 vol.%~8 vol.%

Rango de precisión en concentración

$\pm 0.25\text{vol.}\%$ o $\pm 20\%$ del valor indicado, el que

sea mayor

Especificaciones del sistema de eliminación de gases anestésicos

AGSS activo

Tamaño 430mm×132mm×120mm

Bombeo 25L/min~50L/min (flujo bajo)

75L/min~105L/min (flujo alto)

AGSS pasivo

Conector 30 mm OD cónico

Bandeja para filtro de gas anestésico

Tamaño $\leq 130\text{mm}$ (diámetro)

Límite de peso 2kg

Especificaciones ambientales

Operación

Temperatura (°C)

10 a 40

Humedad relativa (sin condensar)

15% a 95% R.H.

Presión barométrica(kPa)

70 a 106.7

Almacenamiento

Temperatura (°C)

-20 a 60

Humedad relativa(sin condensar)


10% a 95% R.H.

Presión barométrica(kPa)


50 a 106.7



WhatsApp

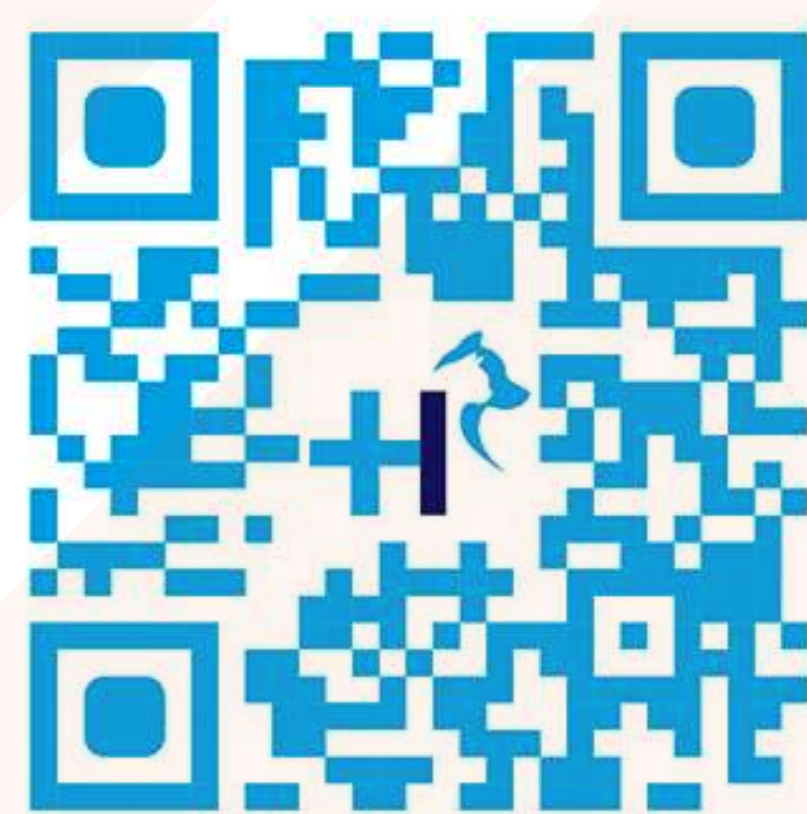

Facebook

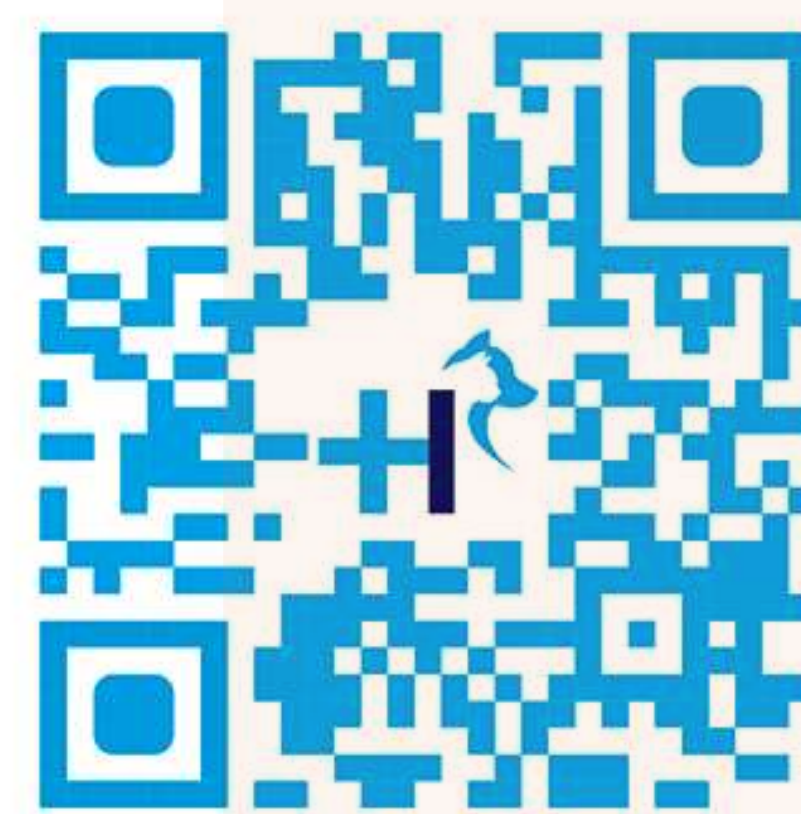

Instagram

www.hergom-medical.com



¿Dudas? ¡Contáctanos!

www.hergom-medical.com




¡Búscanos como @byhergomvet!



**Corporativo y
Casa Matriz.**
Poniente 126-A #62
CDMX
55 3093 9090



**Sucursal
Guadalajara, Jal.**
Sierra Nevada #913
Colonia Independencia Oriente,
44340
33 3617 0335

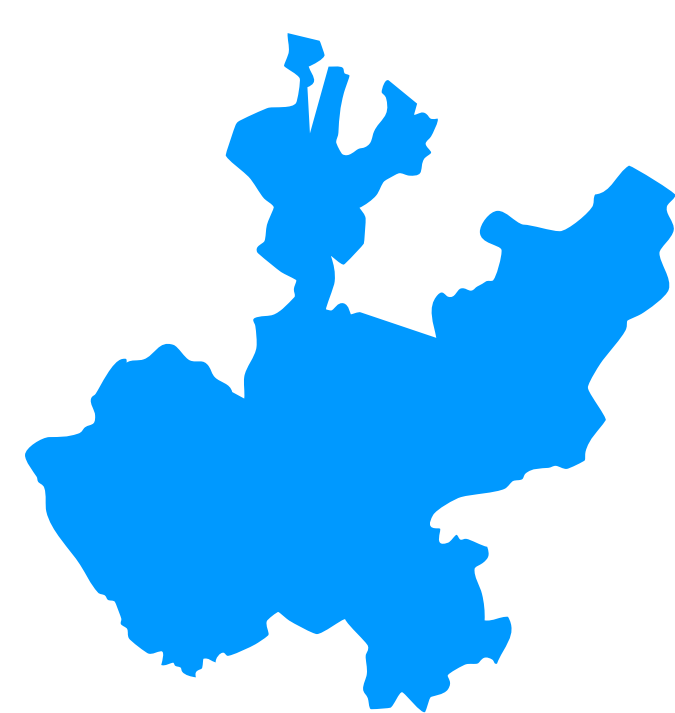

**Sucursal
Monterrey, N.L.**
Miguel Hidalgo y Costilla 1843
Obispado
64060
81 1409 2779



**Sucursal
Puebla, Pue.**
29 Pte. 1102,
Los Volcanes
72410 Heroica
222 211 4462

